



○正しいステッキの調節方法

1. コレットを左方向にまわしてゆるめます。
2. プッシュボタンを押しながら、短管を上げ下げして、最適な高さに合わせて下さい。
3. カチッと音がして、プッシュボタンの頭がきちんと穴から出ていることを確認して下さい。

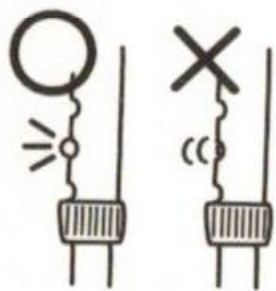

4. コレットを右方向にまわして固定します。

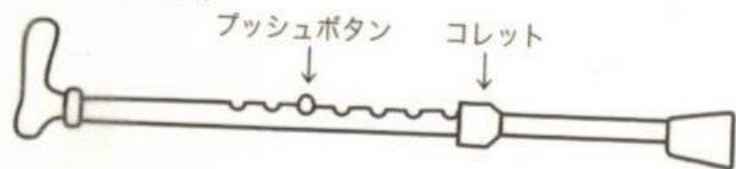

株式会社 アスティ

〒345-0012 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪 193-8

台湾製

調節式ステッキ


取扱説明書

ステッキをご使用になる前に
取扱説明書を必ず読み、
保管しておいて下さい。

取扱説明書

○正しいステッキの使用方法


図のような持ち方で使用して下さい。
誤った握り方ですと転倒し、けがを
する恐れがあります。

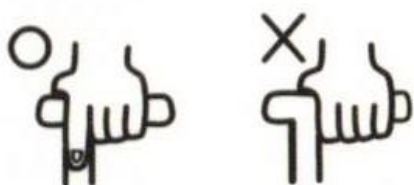

からだに合った杖をお選び下さい

○正しい長さの杖の選び方

杖の先を同じ側の
足先の前方
20cmにおき、
肘が30~40度
屈曲する位置が
最適な長さです。

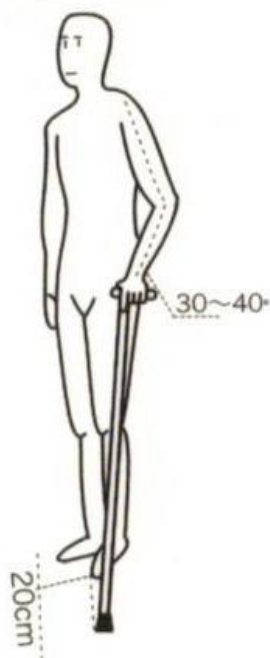

使用上の注意

- 使用前に各部を点検し、接続部を最後まできっちりと入れてから使用して下さい。
- 万一、接続部分にゆるみ等の異状が発生した場合は使用を中止して下さい。
- ステッキの先端の石づきゴムは、定期的に交換して下さい。
- ※長期間しようしているとすり減り、滑りやすくなり大変危険です。
- ステッキは自立歩行出来る人が歩くときに補助としてお使い頂くもので、全体重を支えることはできません。
- 階差の登り降りや車の乗り降り等、滑りやすい路面などでのご使用は十分に注意して下さい。
- 普通の用途以外（例えば登山用、護身用等）には使用しないで下さい。